

AquaJoy

BADEWANNENLIFT

Art.Nr. / AQJA0001



Baden ist ein Stück Lebensqualität und sorgt für Wohlbefinden, Entspannung und Erholung vom Alltag.

Mit dem **AquaJoy-Badelift** kann der Benutzer wieder absolut sicher, selbstständig und ohne Anstrengung ein wohltuendes Bad genießen.



Der **Badelift** für
maximale **Ansprüche**

Badewannenlift AquaJoy

Der Badelift für maximale Ansprüche

- Zweiteiliger akkubetriebener Wannenlift
- Einfaches Zusammensetzen und Auseinandernehmen aller Komponenten
- Maximale Belastung bis zu 170 kg
- Geringes Gewicht, völlig wasserdicht, schwimmfähige Handbedienung
- Weichgriffige, konvexe und konkave Bedientasten an Handbedienung
- Benutzerfreundliches Ladegerät
- Mit oder ohne Auflagematten erhältlich
- Einzigartige, gelgefüllte druckmindernde Auflagen
- Sitzhöhe von 90 mm - 465 mm
- Umfangreiches Zubehör



Einfach zu reinigen




Auflagen waschmaschinenfest



Einfach zu verstauen



Mit wenigen Handgriffen montierbar

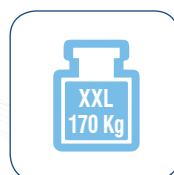

Max. Belastung



Technische Daten

Produkt	Breite	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehne	Gewicht	Max. Belastung
Badewannenlift AquaJoy	68,6 cm	35 cm	42 cm	9 - 46,5 cm	20° - 40°	13,6 kg	170 kg
HMV-Nr.	04.40.01.0049						

Sicherheit und Ergonomie

Das ergonomisch geformte Sitz und Rückenteil bietet dem Benutzer optimalen Sitzkomfort und guten Halt in jeder Position. Die beweglichen Seitenklappen gewährleisten ein einfaches und sicheres Ein- und Aussteigen. Mit dem bedienungsfreundlichen Handschalter kann der Lift stufenlos in die gewünschte Höhe gefahren werden. Beim Loslassen der gedrückten Taste stoppt er sofort.

Handbedienung

Der wasserdichte Handschalter besitzt grosse Schaltknöpfe. Ein Kontroll-Licht im Handschalter zeigt zudem an, ob die Batterie noch genügend aufgeladen ist. Zum Aufaden wird die Steckverbindung gelöst und ausserhalb des Badezimmers ans Ladegerät angeschlossen.

Saugerset

Die vier starken Saugnäpfe garantieren vollkommene Stabilität und Sicherheit. Das geringe Gewicht und die einfache Handhabung ermöglichen ein problemloses Hineinstellen und Herausnehmen aus der Badewanne. Die Saugnäpfe sind anpassungsfähig. Mit einem praktischen Haltegriff sind diese leicht lösbar.

Seitenklappen

Die starken, breiten Seitenklappen erleichtern den Transfer zum und vom Sitz. Ihre angepasste Form schützt zudem den Benutzer seitlich während des Hinauf- und Hinunterfahrens.

Komfort und Design

Durch das formschöne, schlanke Design fügt sich der AquaJoy-Badelift ebenso in traditionelle wie auch in moderne Badezimmer-einrichtungen ein und passt in praktisch alle gängigen Badewannen. Er senkt sich fast auf den Wannenboden ab. In der tiefsten Stellung senkt sich das Rückenteil nach hinten (um 20°) ab, um ein optimales Bad geniessen zu können.




Zubehör Badewannenlift AquaJoy Premier



Kopfstütze



Knauf

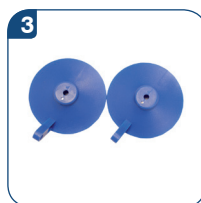

Saugerset



Oberkörper Flügel



Sitz- und Rückenbezug
Gel-Typ



Brust- und
Hüftgurt

1 Kopfstütze

AquaJoy Premier PLUS

AQJA0007

2 Knauf

AquaJoy Premier PLUS

AQJA0021

3 Mittleres Saugerset

AquaJoy Premier PLUS

AQJA0019

4 Oberkörperflügel

AquaJoy Premier PLUS

AQJA0009W

5 Sitzbezug / Rückenbezug Gel-Type

AquaJoy Premier PLUS Rückenbezug

AQJA0005G

AquaJoy Premier PLUS Sitzbezug

AQJA0006G

6 Brustgurt / Hüftgurt

AquaJoy Premier PLUS Brustgurt

AQJA0016C

AquaJoy Premier PLUS Hüftgurt

AQJA0016L

7 Sitzbezug / Rückenbezug (ohne Abb.)

AquaJoy Premier PLUS Rückenbezug Weiß

AQJA0005W

AquaJoy Premier PLUS Sitzbezug Weiß

AQJA0006W



Ihre Fachhändler: