

**TOPRO**



**TOPRO TAURUS...der starke Arm.**



## **TOPRO TAURUS...der starke Arm.**

Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Taurus „Stier“, gleichbedeutend mit Kraft und Anmut. Genau unter diesen Prämissen wurde dieser moderne und sehr funktionale Gehwagen entwickelt. Er bietet je nach Variante optimale Unterstützung für den bewegungseingeschränkten Benutzer, der gut gestützt im TOPRO Taurus sichere Schritte gehen kann. Entwickelt für die moderne Bewegungstherapie kann der TOPRO Taurus bereits als Aufstehhilfe vom Bett oder Stuhl genutzt werden. Mit wenigen Handgriffen ist er auf die ergonomischen Notwendigkeiten seines Nutzers eingestellt. Hierbei werden



Gehen ist in manchen Fällen ein wackeliges und unsicheres Unterfangen. In solchen Situationen ist ein starker Partner eine große Hilfe. Er kann die Unsicherheit und Angst beim Gehen verringern. Er kann ähnlich wie ein starker Arm, auf den man sich stützt, das Körpergewicht auffangen und so die Konzentration ganz auf die Beine lenken. Der TOPRO Taurus ist der sichere Therapeut, der auf Schritt und Tritt stützt und es ermöglicht, sich aufrecht gehend fortzubewegen.

in erster Linie die Körpergröße aber auch der Körperumfang und die Armlagerung berücksichtigt. Die Handgriffe lassen sich optional auf die gewünschte Position einstellen. Alle vier Räder sind schwenkbar und bieten somit umfassende Bewegungsfreiheit. Soll diese Freiheit jedoch aus therapeutischen Gründen eingeschränkt werden, so sind die Hinterräder arretierbar und alle Räder mit einer Feststellbremse versehen. Optional kann der Nutzer mit einer Handbremse seine persönliche Schiebengeschwindigkeit bestimmen und für sich zu jedem Zeitpunkt einen sicheren Halt gewährleisten. Die rutschfesten Räder sind für den therapeutischen Einsatz optimiert.

# DETAILS TOPRO Taurus



Die **stufenlose Höheneinstellung** des TOPRO Taurus H erfolgt durch das Drücken des kleinen Hebels an der Vorderseite der Unterarmauflagen.



**Kippschalter** für die elektrische Höheneinstellung beim TOPRO Taurus E.



Durch die Unterstützung der **starken Gasdruckfeder** im TOPRO Taurus H kann sich der Nutzer mühelos vom Bett, Stuhl o. ä. erheben. Bei fortgeschrittener Genesung ist dies auch ohne eine Hilfsperson möglich.



Die **stufenlose Breiteneinstellung** der Unterarmauflagen ermöglicht ein schnelles Anpassen an die individuellen körperlichen Gegebenheiten.

Mit der **Transportplatte** lässt sich auch jemand mit starken Geheinschränkungen von A nach B transferieren.

# TECHNISCHE DATEN TOPRO Taurus

## TOPRO Taurus

Bauart	H (Gasfeder)	E (elektrisch)
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Höhe der Stützpunkte	86,5-132 cm	86,5-132 cm
Zwischen den Stützpunkten	34-47 cm	34-47 cm
Drehdurchmesser	91 cm	91 cm
Durchmesser Räder	12,5 cm	12,5 cm
Breite Vorder/Hinterrad	31 mm	31 mm
Handgriffe	Anatomisch	Anatomisch
Gewicht	18 kg	24 kg

## ART.-NR. TOPRO Taurus

Gehwagen	Art.-Nr.	Unverbindl. Preisempf.
TOPRO Taurus H	814785	959,- €
TOPRO Taurus H mit einstellbaren Handgriffen	814786	1.189,- €
TOPRO Taurus H mit einstellbaren Handgriffen und Bremse	814787	1.469,- €
TOPRO Taurus E	814790	2.049,- €
TOPRO Taurus E mit einstellbaren Handgriffen	814788	2.289,- €
TOPRO Taurus E mit einstellbaren Handgriffen und Bremse	814789	2.479,- €

Alle Abbildungen, Maße und Preisangaben, vorbehaltlich von Druckfehlern. Toleranzen und Farbabweichungen im Rahmen der technischen Umsetzung können nicht ausgeschlossen werden.



**TOPRO Taurus E**

Den TOPRO Taurus gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Höheneinstellung ist hydraulisch und elektrisch möglich - je nachdem, welches Modell gewählt wird. So ist für jeden Nutzer das passende Modell dabei. Die Höhen- und Breiten-einstellung ermöglicht das Anpassen auf die individuellen Bedürfnisse. Alle Anpassungen sind schnell und ohne Werkzeug möglich. Der TOPRO Taurus bietet Stabilität und maximale Unterstützung beim Gehen. Er ist standfest und stark wie ein Stier.

# ZUBEHÖR TOPRO Taurus



## Halterung für Drainagebeutel

Artikel-Nr. 814034  
Unverbindliche Preisempfehlung 169,00 €



## Tablett für den sicheren Transport von Getränken und Essen.

Artikel-Nr. 814810  
Unverbindliche Preisempfehlung 266,00 €



## Korb für freie Hände, Platz für Geldbeutel, Zeitung, Kleinteile u.ä.

Artikel-Nr. 814821  
Unverbindliche Preisempfehlung 151,00 €



## Träger für Sauerstoffflasche

Artikel-Nr. 814820  
Unverbindliche Preisempfehlung 211,00 €



## Justierbare Handgriffe für eine individuelle Winkereinstellung der Handgriffe.

Artikel-Nr. 814001  
Unverbindliche Preisempfehlung 369,00 €



## Fernbedienung für TOPRO Taurus E

Artikel-Nr. 814805  
Unverbindliche Preisempfehlung 139,00 €



## Infusionsstativ

Artikel-Nr. 814793  
Unverbindliche Preisempfehlung 165,00 €



## Transportplatte für den Transfer des Nutzers zwischen zwei Orten

Artikel-Nr. 814645  
Unverbindliche Preisempfehlung 211,00 €

Komplettiert wird der TOPRO Taurus durch seine große Palette an Zubehör. Zum einen gibt es das eher pflegerische Zubehör wie Infusionsstativ und Halterung für Drainagebeutel bis hin zur Sauerstoffversorgung. Dieses Zubehör erleichtert Therapeuten und Pflegekräften, den Nutzer optimal beim Gehen zu unterstützen. Zum anderen ist da noch das Zubehör, welches dem Nutzer hilft, im Alltag selbständig zu sein.



Alle Produkte werden in Norwegen entwickelt und produziert.

---

**Hersteller:**



TOPRO AS  
Postboks 428  
2803 Gjøvik

**Besuchsadresse:**

Rambekkveien 1  
2816 Gjøvik  
Norwegen

Tel. +47 61 134600  
Fax +47 61 134601  
E-Mail: [post@topro.no](mailto:post@topro.no)

**Qualitätsstandards:**

DIN-EN ISO 9001 – Qualität  
DIN-EN ISO 14001 – Umwelt



Vertriebs- und Schulungszentrum Deutschland:  
Bahnhofstraße 26  
82256 Fürstenfeldbruck

Tel. +49 (0)8141 888939-0  
Fax +49 (0)8141 888939-22

E-Mail: [mail@topro.de](mailto:mail@topro.de)  
[www.topro.de](http://www.topro.de)

---