

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## XXL-TOILETTENSTUHL | ART.NR.: V-40

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## XXL-TOILETTENSTUHL | ART.NR.: V-40

gen Sie anschließend das Produkt mit allen erforderlichen Maßnahmen.

### REINIGUNG

Der XXL Toilettensrollstuhl V-40 sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Die Desinfektion sollte nach jedem Toilettengang erfolgen. Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

### WIEDEREINSATZ

Der XXL Toilettensrollstuhl V-40 ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden. Der XXL Toilettensrollstuhl V-40 sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

### GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung entspricht den 12 Monaten ab dem Kaufdatum. Gewährleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrläs-

sige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Gewährleistung entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile wie Bereifung.

### WARTUNG

Der XXL Toilettensrollstuhl V-40 ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von Ihrem Fachhändler oder Fachmann durchführen. Die Bremsen sollten täglich kontrolliert werden. Das Polster, die Rahmenteile und die Verbindungen monatlich.

### Schön, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres XXL Toilettensrollstuhl V-40es. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Benutzen Sie das Produkt ggf. in Anwesenheit einer Hilfsperson.

Das Toilettensstuhlgestell aus Stahl ist durch eine Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt. Die nach unten abschwenkbaren Armlehnen erleichtern das seitliche Ein- und Aussteigen. Alle 5 Zoll Schwenkräder sind mit wartungsfreien Vollgummireifen versehen. Durch die um 360° drehbaren Räder ist der Toilettensstuhl sehr beweglich und leicht zu lenken. Die leicht zu betätigenden Feststellbremsen der hinteren Schwenkräder sorgen für verlässliche Standfestigkeit.

### LIEFERUMFANG

Der XXL Toilettensrollstuhl V-40 wird teilmontiert im Karton geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Gestell mit montierter Bereifung
- 1 Fußstütze (hochklappbar)
- Rückenlehne mit Armlehnen
- Sitzbrille und Abdeckpolster
- 1 Eimer mit Deckel



Artikel-Nr.	V-40
<b>Technische Daten:</b>	
Sitzbreite (cm)	60
Sitztiefe (cm)	45
Sitzhöhe (cm)	53
Armlehnenhöhe (cm)	22
Öffnung (cm)	25,5 x 30
Gesamtbreite (cm)	70
Gesamttiefe (cm)	89
Gesamthöhe (cm)	96
Gewicht	20,5 kg
Max. Belastbarkeit	250 kg



## GEBRAUCHSANWEISUNG XXL-TOILETTENSTUHL

## GEBRAUCHSANWEISUNG ART.NR.: V-40

### INDIKATION

Toilettenrollstühle sind dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist. Der XXL Toilettenrollstuhl V-40 kann zusätzlich als Sitzgelegenheit und Zimmerrollstuhl, wenn von einer Begleitperson geschoben genutzt werden.

### KONTRADIKTION

Die Verwendung des XXL Toilettenrollstuhl V-40s ist nicht zugelassen bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

### SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem XXL Toilettenrollstuhl V-40 auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass der XXL Toilettenrollstuhl V-40 unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind und die Bremsen funktionstüchtig sind.
- Achten Sie darauf, dass der XXL Toilettenrollstuhl V-40 stets vor dem Wegrollen durch Betätigung der Feststellbremse gesichert ist.
- Der XXL Toilettenrollstuhl V-40 ist nur für den Transport einer Person geeignet. Der Transport von Lasten oder mehreren Personen wird als Zweckentfremdung betrachtet.



- Die Benutzung darf ausschließlich im Innenraum und auf festem Untergrund erfolgen.
- Das Kippisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen oder Beladung vergrößert werden.
- Zur Überwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrrampen.
- Stellen Sie sich nie beim Ein- und Aussteigen auf die Fußplatten
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

### SITZFLÄCHE MONTIEREN

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Legen Sie die Sitzfläche von oben auf den Rahmen. Die Sitzfläche muss so positioniert werden, dass alle Kontaktflächen auf dem Rahmen liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche stabil und sicher auf dem Rahmen liegt.

### SCHWENKROLLEN

Der XXL Toilettenrollstuhl V-40 ist mit vier 5-Zoll Schwenkrollen ausgestattet, wobei zwei der vier Rollen mit Totalfeststeller ausgeführt sind. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen ein Verdrehen gesperrt. Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe.

### FESTSTELLBREMSEN / TOTALFESTSTELLER

Die beiden hinteren Rollen sind mit Totalfeststellern ausgestattet d.h. nach Betätigung sind diese Rollen gebremst und gegen ein Verdrehen gesperrt. Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe. Zum Lösen der Bremse treten Sie auf den kleinen Wipphebel. Der XXL Toilettenrollstuhl V-40 ist nun wieder bewegbar.

### WEGKLAPPEN DER ARMLEHNEN

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Ziehen Sie den Federverschluß/Hebel an den Armlehnen zu sich. Nun können Sie die Armlehne nach unten schwenken. Um diese wieder zu montieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Den Federverschluß/Hebel der Armlehnen einrasten lassen. Vergewissern Sie sich, dass der Federverschluß/Hebel wieder hörbar eingerastet ist.

### HOCHKLAPPEN DER FUSSTÜTZE

Um das Einsteigen zu erleichtern, kann die Fußstütze hochgeklappt werden.

### EIN- UND AUSSTEIGEN VON VORNE

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Die Fußstütze kann zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach hochgeklappt werden. Sobald Sie sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Fußstützen in die normale Position.

### EIN- UND AUSSTEIGEN VON DER SEITE

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Die Armlehnen können zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach unten geschwenkt werden. Sobald Sie wieder sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Armlehnen wieder in die Ausgangsposition.

### BENUTZUNG ALS TOILETTENROLLSTUHL

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Zur Benutzung als XXL Toilettenrollstuhl V-40 schieben Sie den Eimer ohne Deckel von hinten entlang der Führung unter den Sitz. Entfernen Sie die Hygieneabdeckung. Entfernen Sie den Eimer nach der Benutzung und verschließen Sie ihn mit dem Deckel. Hinweis: Der XXL Toilettenrollstuhl V-40 kann ohne Eimer über ein handelsübliches Toilettenbecken gefahren werden.

### NACH DER BENUTZUNG

Entfernen Sie den Toiletteneimer erst nachdem die Person nicht mehr auf dem XXL Toilettenrollstuhl V-40 sitzt, sonst besteht eine Klemmgefahr. Legen Sie den Deckel auf. Reini-