




1. Løsne låsemutter og skru bremsejustering helt inn.
1. Loosen the lock nut and screw home the brake adjustment.
1. Schrauben Sie die Bremseneinstellung ganz rein.

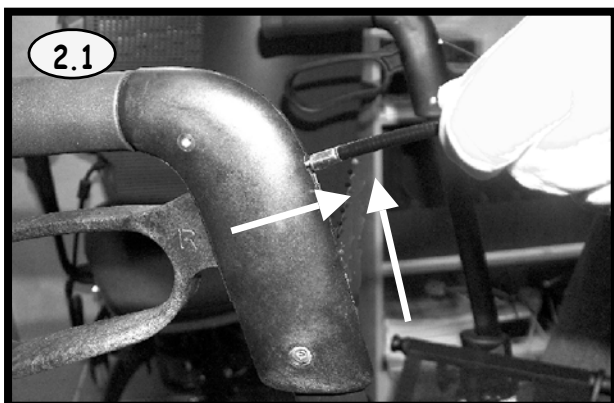


- 2.1 Dra bremsevaieren mot deg og opp  
Se piler på bilde.
  - 2.2 Skyv vaieren inn i håndtak.
  - 2.3 Frigjør vaieren fra bremsehendel og dra den ut.
- 2.1 Pull the wire towards and up. See picture.
  - 2.2 Push the wire in to the handle.
  - 2.3 Release the wire from the handle and pull it out.
- 2.1 Ziehen Sie das Bremsseil zu sich und hoch.  
Siehe die Pfeile auf dem Bild.
  - 2.2 Schieben Sie das Seil in den Handgriff.
  - 2.3 Lösen Sie das Seil vom Bremshebel und ziehen ihn heraus.

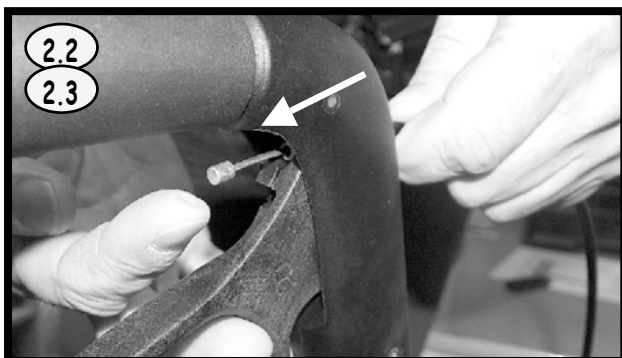


3. Monter den korte vaieren i bremsehendel.  
Gjøres i motsatt rekkefølge av pkt 2
3. Mount the short wire in the brake handel.  
Do it in the the revers order of point 2.
3. Montieren Sie das kurze Seil in den Bremshebel in der umgekehrten Reihenfolge von Punkt 2.

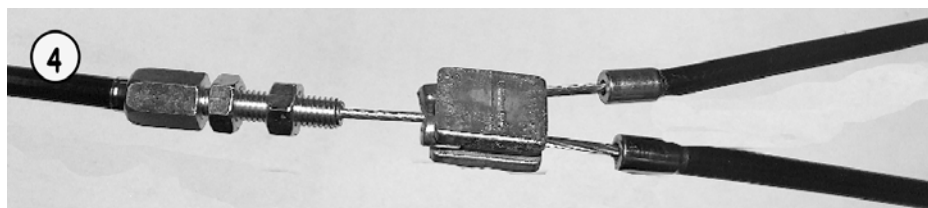


4. Monter begge bremsevaierene sammen med den korte. Se bilde
4. Put together the the short wire and the two long wires. See picture
4. Montieren Sie beide Bremsseile zusammen mit dem kurzen Seil

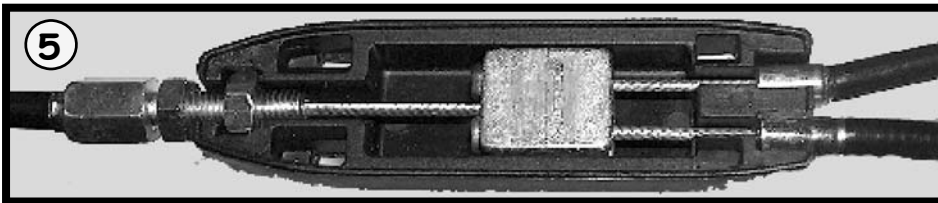


- 5. Monter vaierene i koblingsboksen
- 5. Put all together in the mounting box.
- 5. Montieren Sie die Bremsseile in der Verbindungsbox.

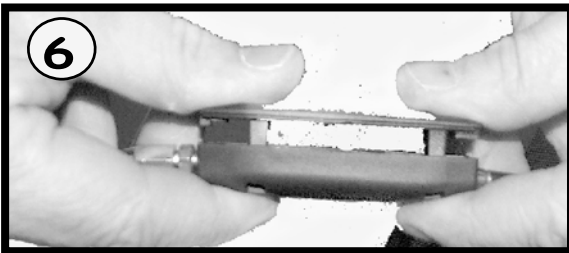

- 6. Klem fast lokk.
- 6. Put the lock on.
- 6. Den Deckel fest andrücken.

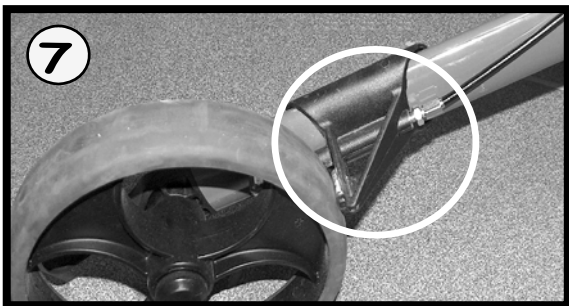

- 7. Juster **BEGGE** bremser slik at bremsesko ligger ca 2 mm fra hjulbane.
- 7. Adjust the **BOOTH** wires. The brake block should be about 2 mm from the wheel.
- 7. Justieren Sie **BEIDE** Bremsen so dass die Bremsbacken ca. 2 mm von der Radbahn liegen.

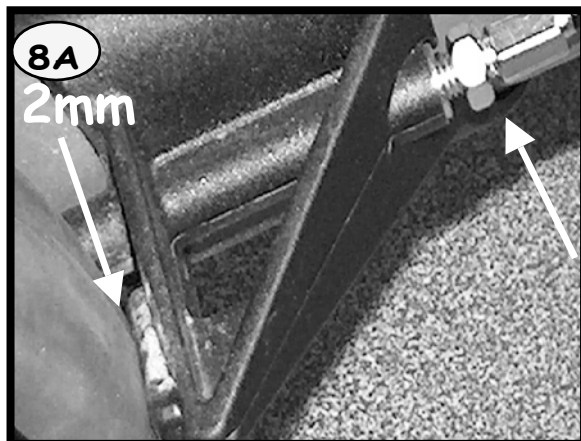

- 8. Skru fast låsemuttere på bremsesko (**8A**) og koblingsboks (**8b**)
- 8. Fasten the lock nuts on the brake adjustments. (**8A and 8b**)
- 8. Die Justierungen mit der Mutteren schliessen. (**8A und 8b**)

