

## Gebrauchsanweisung – Operating instructions



- Duschhocker *DURO* – Shower stool *DURO* ohne Rückenlehne – *without backrest*  
Art.-Nr. – Art. No. 550 500 200
- Duschhocker *DURO PLUS* – Shower stool *DURO PLUS* mit Rückenlehne – *with backrest*  
Art.-Nr. – Art. No. 550 500 300)

## Indikation – Indication

Duschhilfen sind Duschsitze, Duschhocker, Duschstühle, Duschiiegen und fahrbare Duschiiegen, die ausschließlich für den häuslichen Bereich bestimmt sind. Duschhilfen kommen für Personen in Betracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Körperpflege unter der Dusche ohne weitere Anwendung von Hilfsmitteln nicht mehr erlauben. Duschhilfen sind dann indiziert, wenn die Stand-sicherheit des Anwenders eingeschränkt ist. Liegt auch eine Minderung der Sitzstabilität (z.B. Lähmungen im Rumpfbereich) oder eine Schwäche beim Hinsetzen /Aufstehen vor, müssen ggf. Rückenlehne und Seiten-lehnen vorhanden sein. Ggf. ist auch der Einsatz von Duschiiegen erforderlich.

*Shower aids are suitable for persons who are not able to shower without medical devices. In case of instability in standing. In case of reduced stability in sitting or weakness when sitting down or standing up, backrest and armrest must be used.*

## Lieferumfang – Product contents




Stuhl vormontiert / Shower stool pre-assembled



Stuhl montiert / Shower stool assembled


## Montage – Assembling

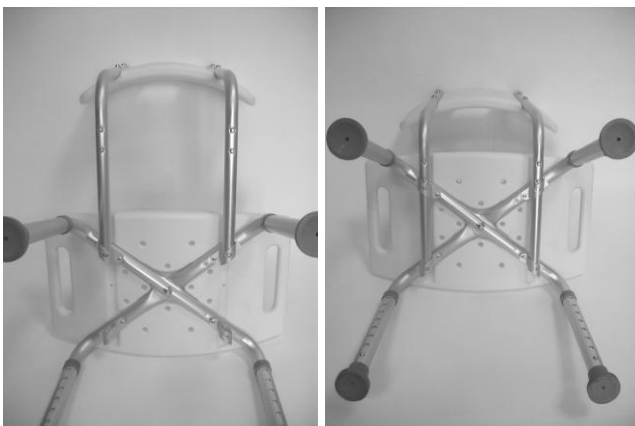

Duschhocker ist vormontiert.  
Vor der Benutzung ist die Rückenlehne einzustecken.

*Shower stool pre-assembled for use.  
Before use the backrest has to be pocketed.*

## Höhenverstellung der Beine – Height adjustment of legs 34 - 52 cm

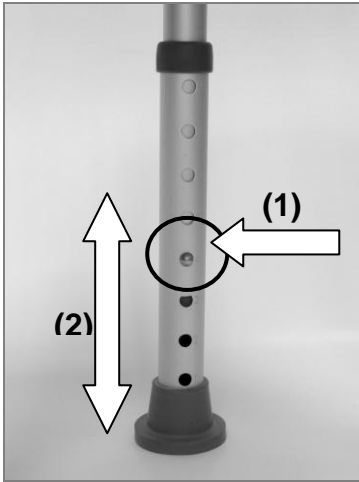

Vor Benutzung den Duschhocker auf die gewünschte Höhe einstellen. *Before use, adjust height of each leg to your specific needs.*

Für die Höhenverstellung der Beine: Knopf drücken (1) und gleichzeitig das Bein herausziehen bzw. einschieben bis der Knopf in der gewünschten Position einrastet (2). Versichern Sie sich, dass der Druckknopf richtig eingerastet ist. *For height adjustment of legs: Press pin (1) and simultaneously pull or push leg to the desired height. When it is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.(2). Make sure that the pin locked correctly into place by pushing down on or by pulling leg.*

Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

*Make sure that all legs are adjusted at the same height.*

## Sicherheitshinweise – Safety instructions

Duschhocker bei Defekt nicht verwenden!  
Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr!  
Maximale Belastung: 130 kg

*Do not use the shower stool if it is damaged!  
Danger of falling!  
Maximum load: 130 kg*

## Reinigung – Cleaning

Keine Scheuermittel verwenden!  
Von Hand mit einem feuchten Tuch reinigen!

*Do not use abrasives!  
Clean by hand with a damp cloth!*

## Technische Daten – Technical Data

Maximale Belastung – <i>Maximum load:</i>	130 kg
Maße Sitzfläche – <i>Dimensions seat:</i>	50 cm x 31 cm
Gesamtbreite – <i>Width over all:</i>	45 cm
Höhe Sitzfläche – <i>Height seat:</i>	3,5 cm
Höhenverstellung – <i>Height adjustment:</i>	8fach – 8 steps: 34 - 52 cm
Rückenlehnenverstellung – <i>Backrest adjustment</i>	3fach – 3 steps
Farbe - <i>Colour:</i>	weiß – <i>white</i>
Gewicht mit Rückenlehne- <i>Weight with backrest:</i>	2,9 kg – 2,9 kg
Gewicht Rückenlehne- <i>Weight backrest:</i>	0,9 kg – 0,9 kg
Gewicht Duschhocker- <i>Weight shower stool:</i>	2,0 kg – 2,0 kg
Material Beine – <i>Material legs:</i>	Aluminium, silber eloxiert (rostfrei) – <i>Aluminium</i>
Material Clipverschluss – <i>Material clip lock:</i>	Messing – <i>brass</i>
Material Sitz – <i>Material seat:</i>	Kunststoff (PE-HD) – <i>high quality plastic (PE-HD)</i>

## Garantie - Warranty

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

*We issue a warranty of 24 months from date of purchase.*

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten.

*Subject to technical alterations.*

Stand - As per: 08/2007



Drive Medical GmbH & Co. KG · Leutkircher Straße 44 · D-88316 Isny/Allgäu, [www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)

Drive Medical Limited · Ainleys Industrial Estate · Elland · GB WEST YORKSHIRE HX5 9JP · [www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)  
Phone +44 1422-314488 Fax +44 1422-314489