

Einleitung

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses.

Der Duschhocker SONO ist ggf. unter Anwesenheit einer Hilfsperson zu benutzen. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschhockers.

Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.



Indikation

Der Duschhocker bietet Personen mit eingeschränkter Stehfähigkeit beim Duschen eine Sitzgelegenheit.

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschhockers ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Lieferumfang

Der Duschhocker wird in einem Karton geliefert.

- 1 Verpackungs- und Transportkarton
- 1 Sitzfläche mit Drehscheibe
- 4 Stuhlbeine (teleskopierbar)
- 1 Ablage

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr SONO unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

- Achten Sie darauf, dass der Duschhocker stets fest und sicher auf allen vier Füßen steht.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Länge befinden.
- Badezusätze oder Waschmittel könnten den Untergrund verändern und damit die Standfestigkeit beeinflussen.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Duschhockers gegeben ist.
- Achten Sie bei Bewegungen (Gleichgewichtsverlagerungen) auf einen sicheren Sitz auf dem Duschhocker.
- Falls Sie sich selbst nicht ausreichend halten können, bitten Sie eine Hilfsperson um Unterstützung.


Montage der Stuhlbeine

Die Teleskopbeine in die dafür vorgesehenen Halterungen der Sitzfläche fest eindrehen.



Montage der Ablage

Die Ablage kann unter der Sitzfläche, zwischen den Stuhlbeinen eingesteckt werden.

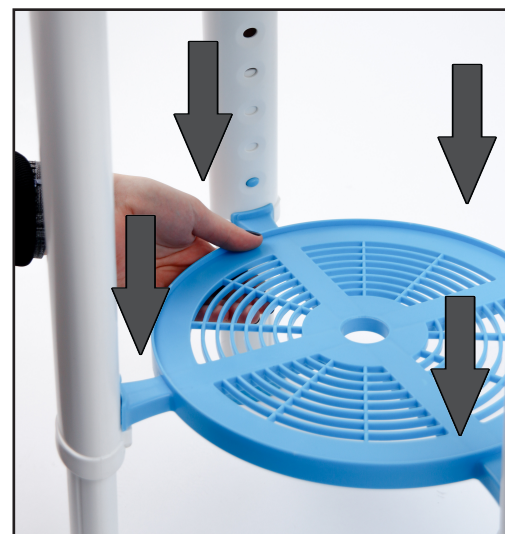


Höhenverstellung der Stuhlbeine

Die Sitzhöhe kann durch Höhenverstellung der Stuhlbeine individuell angepasst werden. Drücken Sie dazu den Federknopf am Stuhlbein in das Teleskoprohr.

Schieben Sie nun das Rohr in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen einrastet.

Wichtig!
Überprüfen Sie ob alle Stuhlbeine auf die gleiche Höhe eingestellt und fest sind.

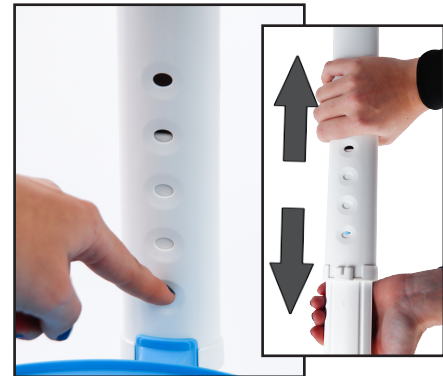

Technische Daten

Material	Kunststoff (PP)
Farbe	weiss / türkis
Sitzdurchmesser (cm)	36
Breite (cm)	36
Sitzhöhe (cm)	42 - 54
Gewicht (kg)	2,85
Max. Belastbarkeit (kg)	180

Reinigung

Der Duschhocker sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Dieser kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden oder bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel. Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Wartung

Der Duschhocker ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschhocker defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24
33106 Paderborn
Deutschland
Telefon +49 (0) 52 54/ 94 79 0
Telefax +49 (0) 52 54/ 94 79 499
E-Mail: info@trendmobil.com
Web.: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler: