

SILVA LEICHTGEWICHTS ROLLATOR



BENUTZERHANDBUCH

Produktspezifikation



- 1 Handgriffe
- 2 Einstellbare Feststell-/ Betriebsbremse
- 3 Rückengurt
- 4 Höhenverstellung der Schiebegriffe
- 5 Sitzfläche mit Zugband
- 6 Einkaufstasche
- 7 Stockhalter
- 8 Hinterräder (gebremst)
- 9 Vorderräder (Lenkräder)

Indikation und Verwendungszweck

Der Aluminium-Rollator SILVA dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 136 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkte Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen. Die Einkaufstasche ist zum Transport von Gegenständen und Waren vorgesehen. Bitte nicht auf die Tasche setzen. Der Rollator darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich.

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen an die Griffe — Kippgefahr! Benutzen Sie auf abschüssigen Wegen die Betriebsbremse (ziehen Sie die Bremshebel nach oben). Benutzen Sie den Rollator nur auf festem, ebenem Untergrund. Bei zu starkem Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen. Beim Zusammenklappen und beim Entfalten des Rollators können Kleidungs- und Körperteile eingeklemmt werden.

Reinigung

Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden Sie hierzu eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wartung

Der Aluminium-Rollator Silva ist weitergehend wartungsfrei. Überprüfen Sie regelmässig ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Lose Schrauben und Muttern müssen wieder fest angezogen werden. Selbstsichernde Muttern müssen nach dem lösen ausgetauscht werden, da sie ihre selbstsichernde Wirkung verloren haben. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, bringen Sie den Rollator bitte zur Instandsetzung zu Ihrem Fachhändler.

ANLEITUNG

Rollator aufstellen/entfalten

Betätigen Sie die Feststellbremse wie in Abb. 6 beschrieben. Ziehen Sie dann den Rollator wie in Abb. 1 zu sehen auseinander. Drücken Sie mit beiden Händen die Seitenrohre der Sitzfläche links und rechts nach unten, bis der Klappmechanismus einrastet (Abb. 2). Fassen Sie hierbei nicht unter den Sitz, da Sie sich sonst die Finger klemmen könnten. Im Anschluss das Rückenband von oben in die Schienen einführen und mit den Schrauben fixieren (Abb. 3).

SICHERHEITSHINWEIS! Vor Antritt jeder Nutzung des Rollators ist darauf zu achten, dass die Feststellschrauben wie in Abb. 4 fest angezogen sind.

REIFENDRUCK! Ihr Rollator verfügt über Luftbereifung. Um die Reifen nicht zu beschädigen und um einen sicheren Stand des Rollators zu gewährleisten, sollte immer der richtige Reifendruck von ca. 2,4 Bar verwendet werden. Prüfen Sie diesen vor Antritt jeder Nutzung!

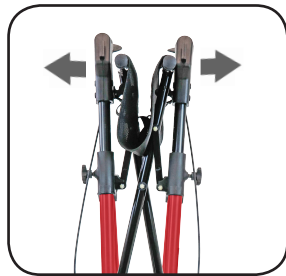


Abb. 1

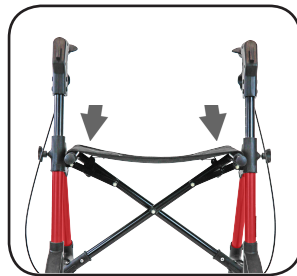


Abb. 2

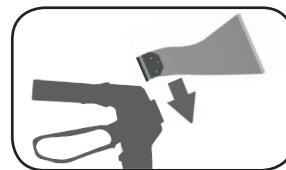


Abb. 3 Rückenband in die Aufnahmeschienen schieben.

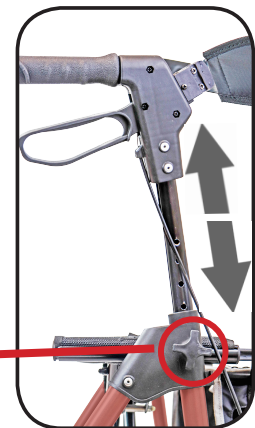


Abb. 4

Griffhöhe einstellen

Die Handgriffe des Rollators können in der Höhe eingestellt werden, um sich der Größe des jeweiligen Benutzers anzupassen. Lösen Sie die Feststellschraube (Abb. 4) und stellen Sie die Griffe auf die gewünschte Höhe ein. Achten Sie bitte darauf, dass beide Handgriffe auf der gleichen Höhe eingestellt und sicher eingerastet sind. Im Anschluss ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest.

Bremse

Betriebsbremse (beim Schieben):
Ziehen Sie die Bremshebel nach oben (Abb. 5).

Feststellbremse (beim Parken):
Drücken Sie die Bremshebel nach unten (Abb. 6).

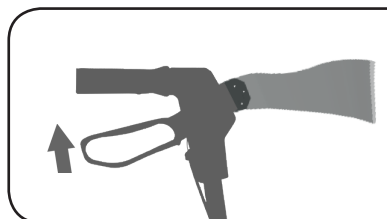


Abb. 5

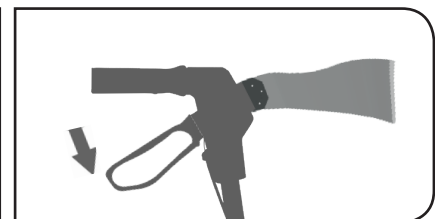


Abb. 6

Steighilfe

Durch Druck mit der Fußspitze auf den verlängerten Rahmen wird das Anheben der Lenkräder und somit eine

Stufenüberwindung erleichtert.



Abb. 7

Rollator falten

Wenn die Einkaufstasche befüllt ist nehmen Sie diese vorher vom Rahmen ab. Ziehen Sie das Verriegelungsband in der Mitte der Sitzfläche nach oben — der Rollator faltet sich. Für den weiteren Faltvorgang gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie in dem Absatz „Rollator aufstellen/entfalten“ beschrieben vor.

Technische Daten

| | |
|---------------|-------------|
| Länge | 70 cm |
| Breite | 59 cm |
| Griffhöhe | 82 - 95 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm |
| Sitzbreite | 44 cm |
| Gewicht | 8,65 kg |
| Belastbarkeit | 136 kg |
| Farbe | rot |
| Radgröße | 290 x 40 mm |

Lieferumfang

- Rollator Silva
- Rückengurt
- Einkaufstasche
- Bedienungsanleitung



TRENDMOBIL GmbH
Fohling 24
33106 Paderborn
Tel.: +49 (0)5254 94790
Fax: +49 (0)5254 9479499
E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler